



Harelbekestraat 33 - 35
8540 Deerlijk
T 056 71 25 69 - Fax 056 71 33 59
info@pamar.be - Webshop www.pamar.be

Belangrijke informatie

Dit mondmasker is niet voor medisch gebruik bedoeld. Gebruik dit mondmasker vooral om te vermijden dat je zelf andere personen besmet. Dit mondmasker geeft geen garantie voor het niet-besmetten van andere personen en dient niet te worden gebruikt als je in de buurt van besmette personen bent of als je een besmette persoon wilt verzorgen.

Let op:

Dit mondmasker moet voor gebruik eerst op 90° worden gewassen.
Was dit daarna minstens één maal per dag op 90°.

Hoe gebruik je een mondmasker op een correcte manier?

- Was de handen grondig met zeep, voordat je het masker aanraakt.
- Het masker moet zo goed mogelijk aansluiten op het gezicht.
- Een blauwe stikking geeft de binnenkant van het masker aan.
- Indien nodig, leg dan een knoopje in de elastiek zodat het masker goed aanspant.
- Ook de neus moet in het masker. Controleer of het voldoende aansluit onder de kin.
- Raak het tijdens het dragen niet meer aan.

Hoe verwijder je het mondmasker?

- Na het wassen of desinfecteren van de handen is het hierbij belangrijk om naar voor te buigen de beide elastieken met twee handen vast te nemen en los te trekken.
- Zeer belangrijk is om het gezicht en het masker daarbij niet aan te raken.
- Berg het onmiddellijk in een container om warm te wassen (voorkeur op 90°C).
- Was opnieuw de handen grondig met water en zeep.


Het mondmasker voldoet niet aan de hoogste medische richtlijnen voor mondmaskers en is geen garantie voor het reduceren van besmettingsrisico.

Elke vorm van verantwoordelijkheid, resp. aansprakelijkheid wordt hieromtrent afgewezen.

PRODUCTFICHE

MONDMASKER 2-laags met 2 hoofdelastieken met filtervak voor filters geschonken door overheid

- 100 % katoen stof
- Technische specificatie 65/65 30/30 165 grs./m²
- Model : dubbel gelaagd met 2 elastieken om vast te leggen om het hoofd
- Type accordeon 11 x 18 cm
- Dit model is gemaakt op de meest ergonomische wijze, dubbel gelaagd voorzien van filtervak op maat gemaakt voor het plaatsen van de verwisselbare filter geschonken door de overheid
- Het masker bevat een neusbrug die zorgt voor een nog beter bescherming, ideaal voor personen met bril

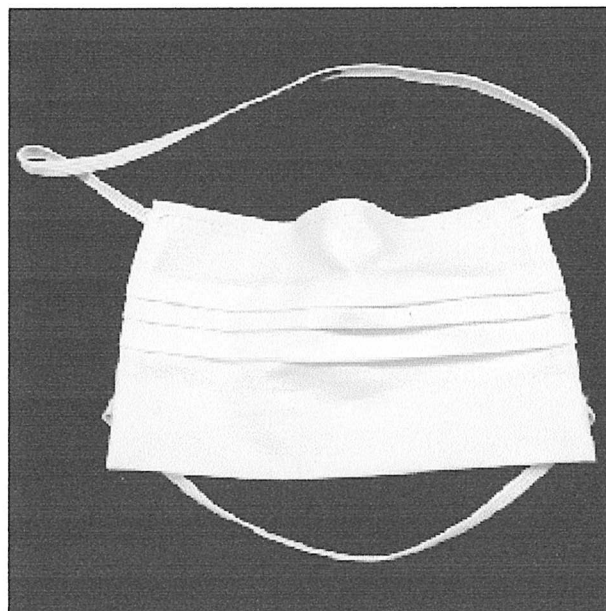

- Ambachtelijk, regionaal geproduceerd, koop lokaal !
- Dit type behoort tot de "community" maskers, en behoren niet tot de categorie van chirurgische of PPE-maskers